



# Guide d'utilisation rapide Padscan HD2

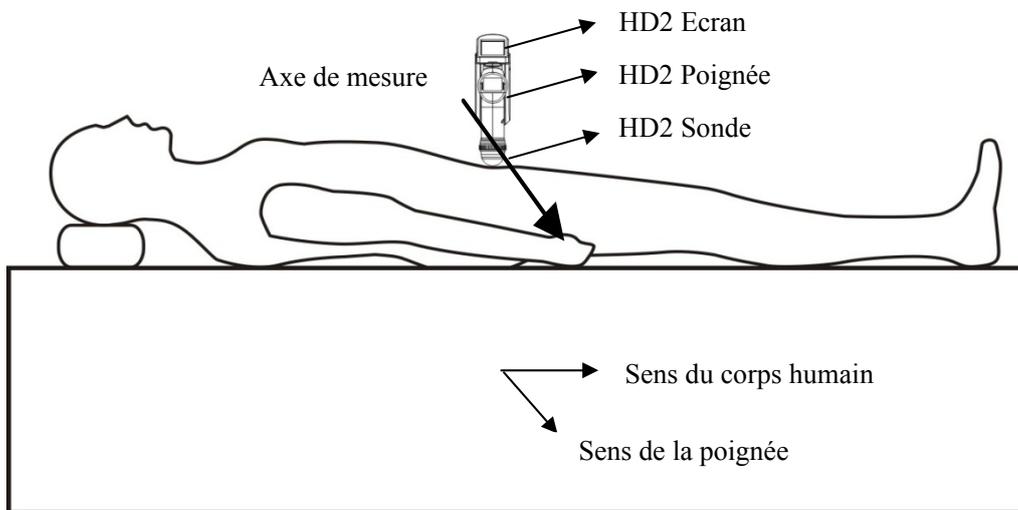

**Mode d'emploi :** Allumez l'appareil → enduire la sonde de gel echo → appuyez sur la touche de scan → déplacer la sonde pour obtenir une image maximale de la vessie → appuyez sur la touche pour afficher le résultat → appuyez longuement sur la touche vocale pour enregistrer les données patient → relâcher la touche vocale pour terminer le message audio et image → Eteindre l'appareil

**Placement de la sonde:** Déplacer la sonde à 3 cm de distance de la marge supérieure de la symphyse pubienne, elle doit maintenir une ligne verticale entre la direction de la poignée et la direction horizontale du patient. Lorsque vous détectez un petit volume, inclinez la sonde pour obtenir une image maximale de la vessie centrée sur la ligne verte

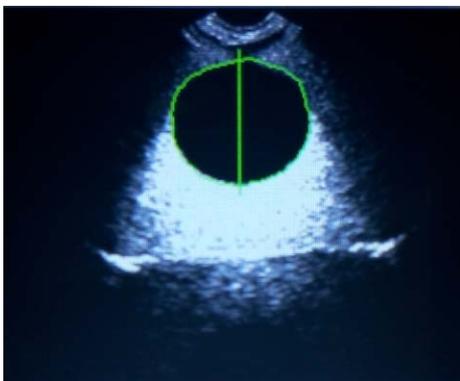


**Mode Expert: Médial et maximum (correct)**



**Mode Expert: Décentré et trop petit (risque d'erreurs de mesure)**



**Mode Facile: Médial et maximum (correct)**

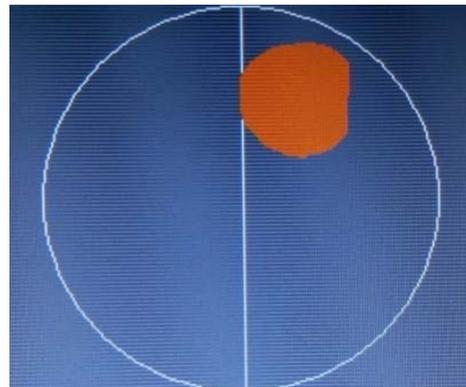

**Mode Facile: Décentré et trop petit (risque d'erreurs de mesure)**